



À : Tous les paramédics du Groupe CAMBI

De : Direction Clinique

Date : 04 août 2022

Révisé le : 22 janvier 2024

Objet : Bris répétitifs au niveau des câbles des moniteurs Zoll

Chers(es) Paramédics,

Dernièrement, nous avons remarqué que depuis plusieurs mois, un nombre anormalement élevé de câble de monitoring (4 brins et 6 brins) ont dû être changés. Nous avons identifié quelques causes probables de bris, et nous aimerions donc porter votre attention sur certains éléments à respecter, liés à la manipulation et au nettoyage des câbles.

#1 : Il est désormais interdit de déconnecter le câble 4 brins du moniteur sur les interventions. Cette manipulation est susceptible de briser la fiche et/ou le câble à sa jonction.



#2 : Il est important de ne pas imbiber de désinfectant la partie métallique du connecteur. Cela entraîne la formation de corrosion et risque d'endommager le connecteur. Si toutefois un connecteur est mouillé ou devient humide lors du nettoyage, il est important de l'assécher immédiatement avec un linge sec.



#3 : Ne jamais retirer les connecteurs du patient en tirant sur les câbles. Retirer un à un les connecteurs de leurs électrodes (tirer perpendiculairement le connecteur par rapport à son électrode).

Important : Lors de bris ou défectuosité d'un câble, comme pour tout autre équipement, veuillez compléter le formulaire « Bris-perte-défectuosité d'équipement » afin de décrire la problématique et de nous permettre de faire le suivi nécessaire.

Merci de votre habituelle collaboration,

La direction Clinique